

MindLenses Professional

Una risorsa in più per la Riabilitazione Cognitiva dopo un Ictus

Ti stai prendendo cura di una persona colpita da **ictus**?

MindLenses Professional può essere un **utile strumento** nel suo percorso di **riabilitazione**.

MindLenses Professional è un trattamento **altamente innovativo**, basato sugli ultimissimi sviluppi della **ricerca scientifica**. Non c'è da preoccuparsi se il tuo Professionista di riferimento non ne è ancora venuto a conoscenza: **vista la novità, è normale!** MindLenses Professional è stato riservato fino ad ora ad un numero selezionato di cliniche.


Abbiamo preparato una guida con alcune risposte alle **domande più frequenti** riguardo la Riabilitazione Cognitiva con MindLenses Professional. **Portala con te o inviala al tuo Professionista di riferimento**: ti saprà indicare se e come inserirlo nel piano terapeutico.

COS'È MINDLENSES PROFESSIONAL?

- MindLenses Professional è una **terapia digitale** per la Riabilitazione Cognitiva. Si può utilizzare in presenza di **deficit cognitivo**, per esempio in caso di disturbi di memoria, attenzione, linguaggio.
- MindLenses Professional è un **dispositivo medico di Classe I** per il trattamento dei deficit cognitivi derivanti dall'**ictus cerebrale**.
- È stato dimostrato che MindLenses Professional migliora le capacità cognitive misurate tramite test prima e dopo il trattamento, in maniera osservabile nei **comportamenti quotidiani**.
- MindLenses Professional è composto da un **tablet** e da un dispositivo per l'adattamento **visuo-motorio**.

COME FUNZIONA?

- La somministrazione del trattamento con MindLenses Professional avviene principalmente tramite il **tablet**.
- Il tablet viene utilizzato per far eseguire al paziente una serie di **esercizi in forma di gioco**.
- Gli esercizi sono specificatamente progettati per **stimolare le aree del cervello** più colpite a seconda della funzione da riabilitare (memoria, attenzione, linguaggio ecc.)
- L'esercizio su tablet è preceduto da una procedura di adattamento visuo-motoria, nota come **adattamento prismatico**, che massimizza l'effetto degli esercizi.

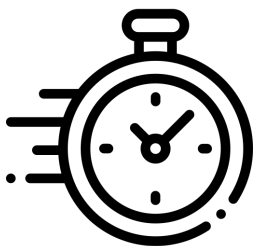


Il piano terapeutico di MindLenses Professional prevede **10 giorni** di trattamento consecutivi ogni **6 mesi**, più una sessione di anamnesi iniziale e una di follow-up.

Gli incontri potranno essere consecutivi (dal Lunedì al Venerdì per 2 settimane), oppure distribuiti in 3 incontri settimanali (Lunedì, Mercoledì, Venerdì per 3 settimane più il Lunedì successivo).

- Durante i 10 giorni di trattamento, le sedute richiedono un impegno di **circa mezz'ora**.

A CHI MI DEVO RIVOLGERE PER UTILIZZARE MINDLENSES PROFESSIONAL?

MindLenses Professional può essere utilizzato esclusivamente dagli **operatori sanitari** (neurologi, psicologi, logopedisti, terapisti occupazionali...).

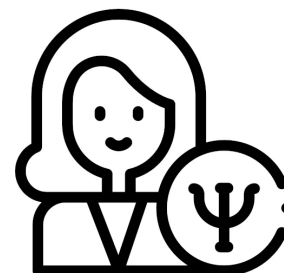

MindLenses Professional è da intendersi per l'utilizzo come parte di un piano terapeutico che **può includere altri interventi**, tra cui strategie comportamentali ed educative, interventi di logopedia, terapia occupazionale e così via. MindLenses Professional **non è in conflitto** con tali interventi.

- Il tuo professionista di riferimento (neurologo, psicologo ecc.) **valuterà in autonomia** l'opportunità di utilizzare MindLenses Professional, dopo aver preso in considerazione la **diagnosi** e il **piano terapeutico** del paziente.
- **Se non ne è ancora in possesso**, il professionista può rivolgersi a Restorative Neurotechnologies per la sottoscrizione di un piano di abbonamento annuale alla piattaforma MindLenses Professional.
- Tra la sottoscrizione del piano e il recapito del dispositivo passano circa 15 giorni.

Continua a leggere!

Nella prossima sezione affronteremo le **domande più frequenti** riguardo il trattamento con MindLenses Professional.

DOMANDE FREQUENTI

Ho parlato di MindLenses al mio professionista di riferimento, ma non lo conosce. Cosa posso fare?


Questo è piuttosto normale. MindLenses Professional è un trattamento altamente innovativo. Consegna al tuo professionista di riferimento questo documento: saprà come muoversi! Inoltre, saremo felici di rispondere alle sue eventuali domande all'indirizzo info@restorativeneurotechnologies.com.

Nessuno, tra i miei conoscenti, ha mai sentito parlare di questo trattamento. Come mai?

Anche questo è normale. MindLenses Professional è un prodotto dedicato agli specialisti delle professioni sanitarie. È stato utilizzato fino ad ora in un numero selezionato di cliniche di eccellenza e solo di recente è stato messo a disposizione del grande pubblico.

Il mio familiare potrebbe avere qualche difficoltà a seguire gli esercizi proposti, anche se sono in forma di gioco.

Questa preoccupazione è normale e legittima. È importante considerare che gli esercizi di MindLenses Professional sono progettati tenendo conto delle difficoltà delle persone colpite da deficit cognitivo (per es. di concentrazione). L'aderenza alla terapia è quindi di solito molto alta. Un bravo terapeuta sa come intervenire nel caso sorgessero delle necessità specifiche.

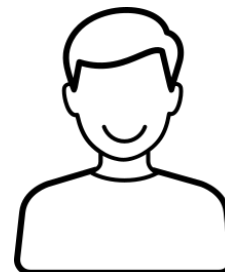

Le abbiamo già provate tutte senza successo. Questo funzionerà?

Non possiamo promettere a nessuno cure miracolose. Detto questo, MindLenses Professional è efficace nel migliorare le capacità cognitive come memoria, attenzione e linguaggio, misurate tramite test prima e dopo il trattamento e in maniera osservabile nei comportamenti quotidiani. Un bravo professionista e la giusta combinazione di interventi terapeutici, incluso quello con MindLenses Professional, fa la differenza.

MindLenses Professional funziona anche per altre patologie in cui sia necessario un intervento di riabilitazione cognitiva?

MindLenses Professional è un dispositivo medico di Classe I per la riabilitazione cognitiva post-ictus. A discrezione del professionista può essere utilizzato anche in casi dove ci sia un deficit cognitivo per altre cause (per esempio: demenze, traumi cranici, disturbi del neurosviluppo).

Vorrei MindLenses Professional per il mio familiare. A chi posso rivolgermi?

Presenta questo documento al tuo professionista di riferimento: la decisione spetta a lui/lei e, in caso decida di cominciare ad utilizzarlo, saprà come muoversi. Se invece vuoi essere supportato nella ricerca di un professionista che già utilizza MindLenses Professional vicino a te, contattaci!

CONTATTI

Sito web

<https://www.restorativeneurotechnologies.com/>

E-mail

info@restorativeneurotechnologies.com

Telefono

+39 347 8916822

Pagine Social



<https://www.facebook.com/restorativeNT>



<https://www.linkedin.com/company/restorative-neurotechnologies/>



https://twitter.com/restorative_nt